

## **CD115CF5**

### **Connecteur Fémoral Coyote 5 degrés**

Limite de poids : 120KGS.

Garantie de 2 ans contre les défauts de fabrication, l'usure excessive ou la casse.

Fabriqué aux États-Unis

Composants prothétiques externes

Advena Limited Tower Business Centre 2nd Flr, Tower Street Swatar, BKR 4013 Malte

CD115CF5.revA.04262021

Fabriqué par : Coyote 419 N. Curtis Rd., Boise, Idaho 83706 (208) 429-0026 |

[www.coyote.us](http://www.coyote.us)

#### **Inclus dans le paquet :**

Connecteur Fémoral à 5 degrés, plaque à 5 trous, 6mm x 14mm, petit cercle en mousse.

Le connecteur Fémoral à 5 degrés CD115CF5 est principalement utilisé avec le Coyote Lanyard Lock CD118 mais peut être utilisé avec d'autres systèmes de broches distales Coyote.

1. Déterminez l'emplacement du verrou.
2. Utilisez la colle Coyote Quik Glue ou une résine époxyde de votre choix pour fixer le verrou au connecteur à l'endroit souhaité.
3. Posez comme d'habitude, en renforçant les zones de sous-coupe **importante, en gardant le bord supérieur des poteaux de connexion ouvert.**
4. Utiliser des vis de 6 mm x 14 mm pour fixer la plaque à 5 trous. Ces vis sont uniquement destinées à la stratification.
5. Stratification
6. Retirer la plaque à 5 trous et fixer le connecteur souhaité. Veillez à utiliser des vis de la bonne longueur pour le connecteur choisi.

Serrez les vis du connecteur à 14 Nm. Lors de la fixation des composants, veillez à ce que les vis fassent toute la longueur de la plaque du connecteur. Utilisez de la Loctite bleue 242 sur les vis du connecteur après avoir effectué tous les réglages.