

CD4250

Coyote QUIK GLUE

Noir - 50cc - Temps de prise 30 secondes

Fabriqué aux États-Unis

Composants de prothèses externes

Advena Limited Tower Business Centre 2nd Flr, Tower Street Swatar, BKR 4013 Malta
CD4250.revD.04082021

Fabriqué par : Coyote 419 N. Curtis Rd., Boise, Idaho 83706 (208) 429-0026 |
www.coyote.us

Pièces incluses :

Petit embout (1)

Coyote Quik Glue 50cc

Conseil technique

Conservez toute la colle dans un environnement frais pour une meilleure longévité.

Instructions

1. Purgez la cartouche. Coupez l'embout. Insérez la cartouche dans le pistolet distributeur. Expulsez une petite quantité de colle pour purger la cartouche.
2. Installation de l'embout de mélange Alignez l'embout de manière appropriée et mettez-le en place en le tournant. Les embouts ne peuvent être utilisés qu'une seule fois.
3. Faites passer une perle d'essai d'environ 2,54cm de long. Conservez la partie non utilisée en laissant l'embout de mélange en place lorsque vous avez terminé.
4. Laissez l'embout utilisé attaché comme un bouchon jusqu'à la prochaine utilisation pour éviter que la colle ne sèche dans les tubes.
5. Lorsque vous êtes prêt à réutiliser la colle, retirez l'ancien embout et remplacez-le par un nouvel embout.

Attention

1. Lisez attentivement le mode d'emploi AVANT d'appliquer la colle pour assurer une bonne adhésion.
2. La colle Quik Glue prend extrêmement vite. Pour assurer une bonne adhésion, travaillez très rapidement. Réfrigérer la cartouche pour ralentir le temps de travail.

Pièces vendues séparément

CDDMA51 | Le distributeur est nécessaire pour l'utilisation (vendu séparément)

CD401 | Pack de 6 embouts supplémentaires pour cartouche de 50 cc.

CD402 | Paquet de 12 embouts supplémentaires pour cartouche de 50 cc.

Contactez Coyote pour obtenir une fiche de données de sécurité pour ce produit.
(208) 429-0026 ou coyote@coyoteprothetics.com