



Wave Suction Band

CD130BM, CD130BL, CD130BS,
CD130BX, CD130BXX Vektgrense



Fabrikasjonsinstruksjoner

: 265 lbs.

2 års garanti mot produsentfeil, overdreven slitasje eller brudd.



Advena Limited Tower Business Center 2nd Flr, Tower Street Swatar, BKR 4013 Malta

Produsert av Coyote®

419 N. Curtis Rd., Boise, Idaho 83706

(208) 429-0026 | www.coyote.us



Deler innkludert

Wave Suge Band

2 Oz. Silikonlim

bølgesugebånd

Delenummer	Størrelser på	Størrelse	Omkrets	Bredde	Tykkelse
CD130BS	Small	16cm - 25cm	7,62 cm	4mm	
CD130BM	Medium	25cm - 37cm	7,62 cm	4mm	
CD130BL	Large	37cm - 49cm	7,62 cm	4mm	
CD130BX	Extra Large	49cm - 64cm	7,62 cm	4mm	
CD130BXX	Extra Extra Large	64cm - 77cm	7,62 cm	4mm	




1 Med liner på pasientposisjonsbånd på ønsket sted.




2 Merk båndplasseringen på distale og proksimale sider av båndet.




3 Merk båndplasseringen på den proksimale siden.

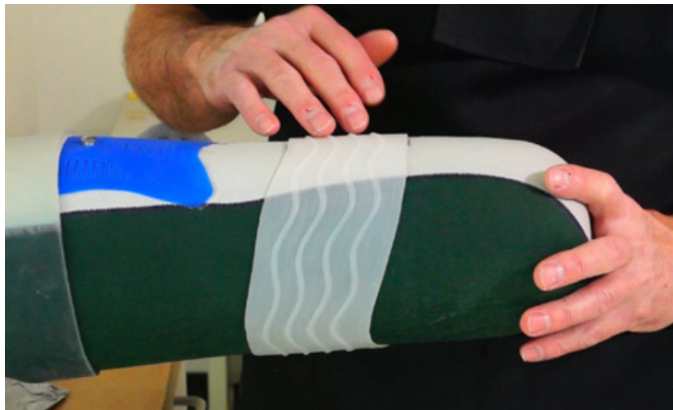


4 For ukonvensjonell båndposisjon, merk bånd på flere steder.

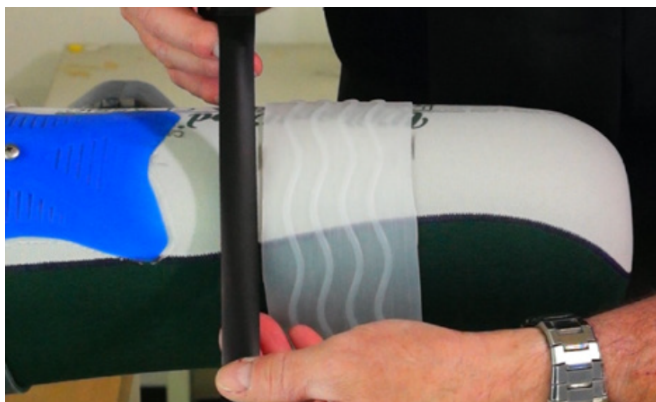

5 Pakk inn foringen med elektrisk tape eller vinyltape ved siden av båndet uten å overlappe det.

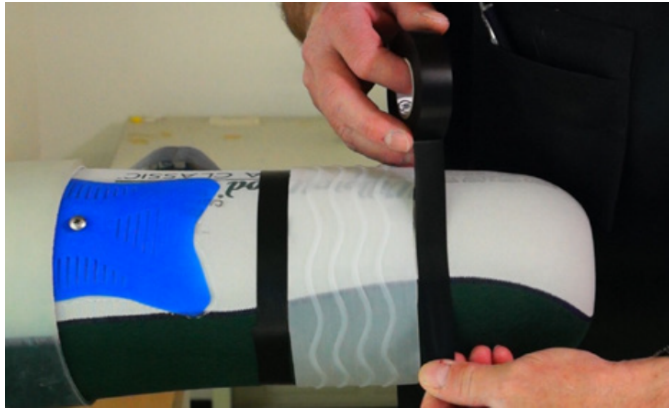


6 Tape av begge ender av båndet.

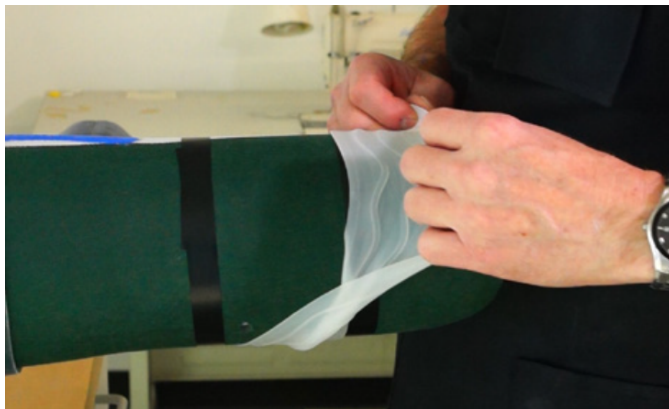


7 Fjern båndet



8 Legg til ekstra tape for å beskytte et større område.

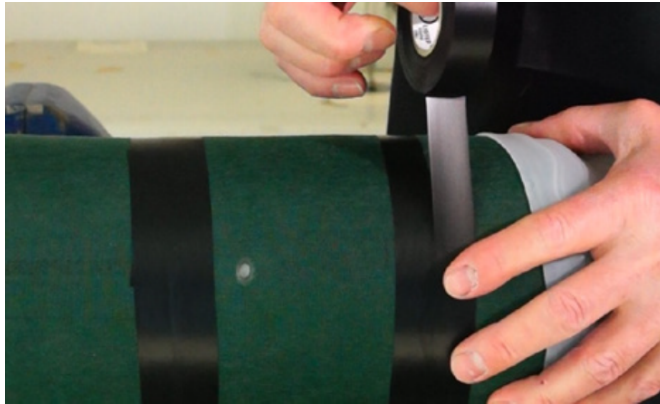

9 Legg til beskyttende kran på begge sider.

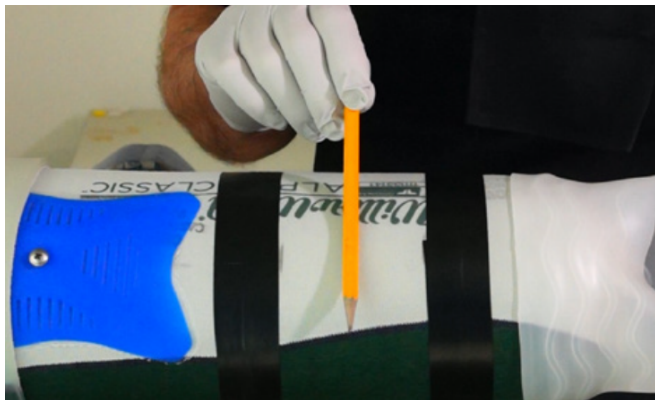

10 Sett en perle med silikonlim rundt foringen på omtrent tykkelsen av en blyant.




11 Glatt silikonet ut med en tungepresser. Sørg for å mette materialet.



12 Sjekk kantene for områder som trenger mer silikonlim.




13 Glatt silikonet ut.

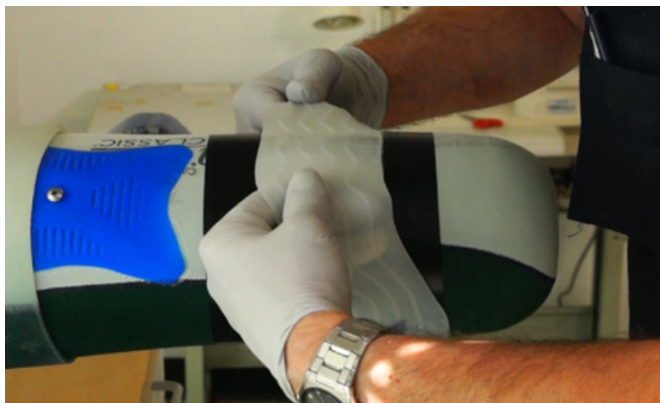


14 Plasser tetningsbåndet forsiktig over det limte området.




15 Sentrer båndet med tape til kantene.

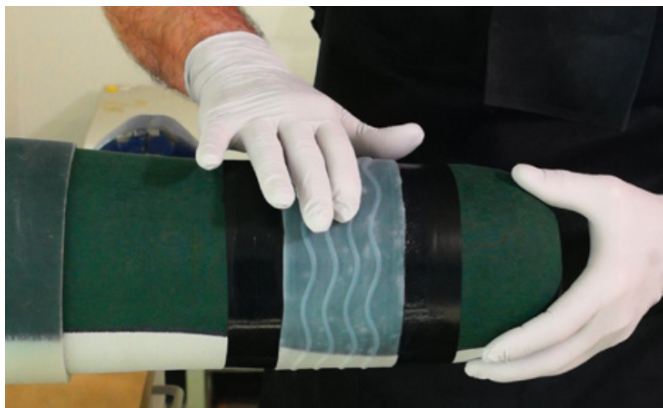


16 Skyv luftboblene ut under båndet

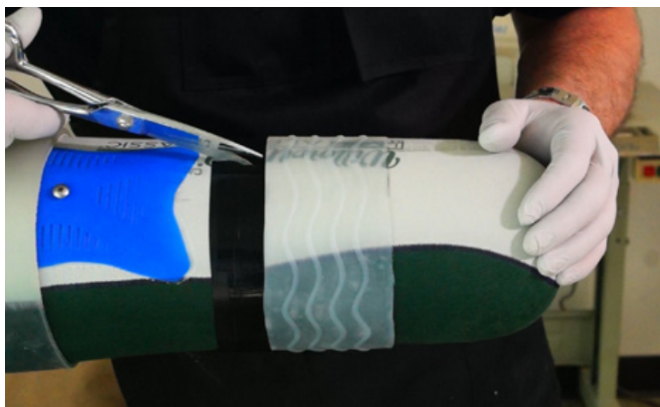


17 Fjern tapen fra foringen.

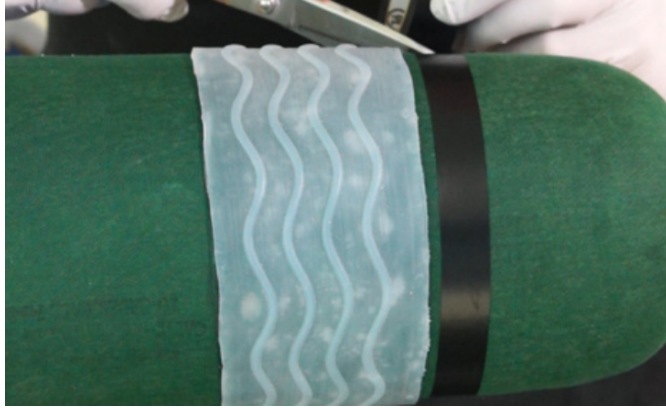

18 Lag en tetningsbåndkant med silikonlim.

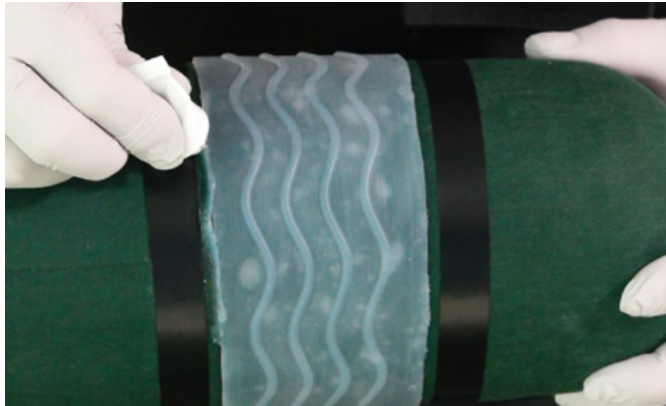


19 Rull tape ved siden av båndkanten ca. 1/4 tomme avstand fra båndet.

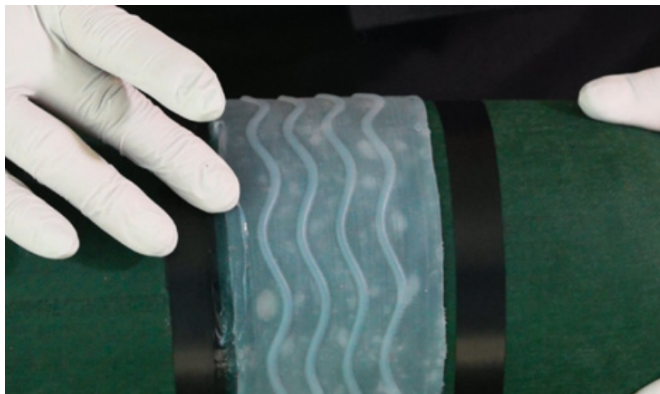

20 Glatt silikon inn i stoff og bånd. Å lage en forseglet kant.



21 Fjern tapen.

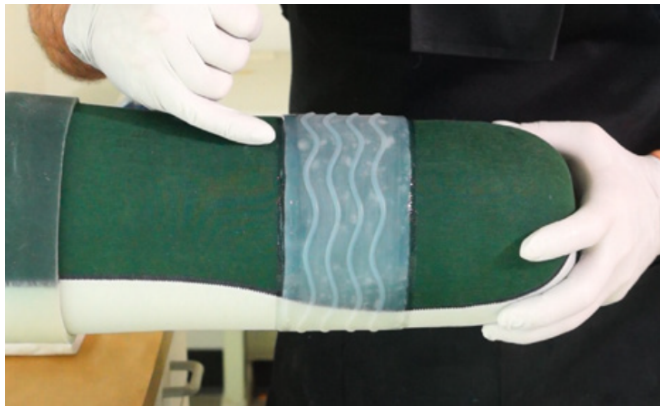

22 Sjekk arbeidet ditt og la silikonet stå i minst to timer før du legger det på pasienten.

Oppleggsinstruksjoner er nyttige tips om hvordan du arbeider med låsen og koblingen. Faktiske lay-ups er teknikerens og/eller utøverens ansvar.